

ルーム一覧

「**管理者メニュー**」 ※管理者用パスワード必要
ステーションの設定や居室の名前など詳細な設定ができます

「**データ分析**」 ※管理者用パスワード必要
主に居室内での活動レベルの変化を把握できます

「**声かけ設定**」
各声かけ機器に登録する自動声かけ内容の登録

- 検知
- ベッド
- ベッド安静
- 居室
- トイレ
- 不在
- 見守り停止
- エリア
- 呼出中
- 未接続 (正常系)
- 未接続 (異常系)
- エラー




声かけ機器/リモコンの接続状態、通話状態を表示

- | | | | |
|---------|--|-----|------------------------------|
| [上] ベッド | <input checked="" type="checkbox"/> 正常接続 | 呼出中 | <input type="checkbox"/> 未接続 |
| 共用 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常接続 | および | |
| [下] トイレ | <input checked="" type="checkbox"/> 正常接続 | 通話中 | |

ライブ一覧



※この2つが出ていたらご連絡ください

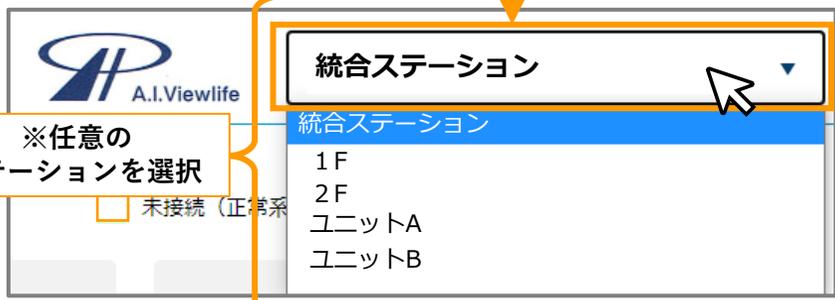

ライブビュー画面の見方

Webシステムで見守り



お問い合わせはこちら

2024年9月版

エイアイビューライフ株式会社
TEL : 03-6261-6327 / support@aiview.life



画面左上の
左矢印で1つ前の画面に
戻ります

赤:呼吸レベル
青:体動レベル

:低い
:標準
:高い

直近の検知項目
※通話状態の時は
呼出中or通話中を表示

直近の検知項目
発生時刻

表示する

- 起き上がり
- 境界位
- 立位
- 離床
- ベッド転落
- ずり落ち
- 転倒
- うずくまり
- 横たわり
- 生体異常
- トイレ異常
- 入室
- 退室
- トイレIN

表示する ▾

各居室ごとに
設定された検知項目



フロア1F

▶ ルーム一覧

▶ ライブ一覧

▶ 管理者メニュー

▶ データ分析

▶ 声かけ設定

ルーム : ルーム名
ベッド : ベッド名
センサー : センサー識別子
声かけ機器 : 声かけ機器識別子①
声かけ機器識別子②

入居者名

境界位

2021/05/13 10:54:04



見守り状態 見守り中

在室状態 ベッド

検知項目 表示する


録画終了日 2023/09/30 23:59

録画モード 録画中

検知時動画 使用率 91%
保存容量

常時録画 使用率 89%
保存容量

見守り操作を行った端末の履歴確認

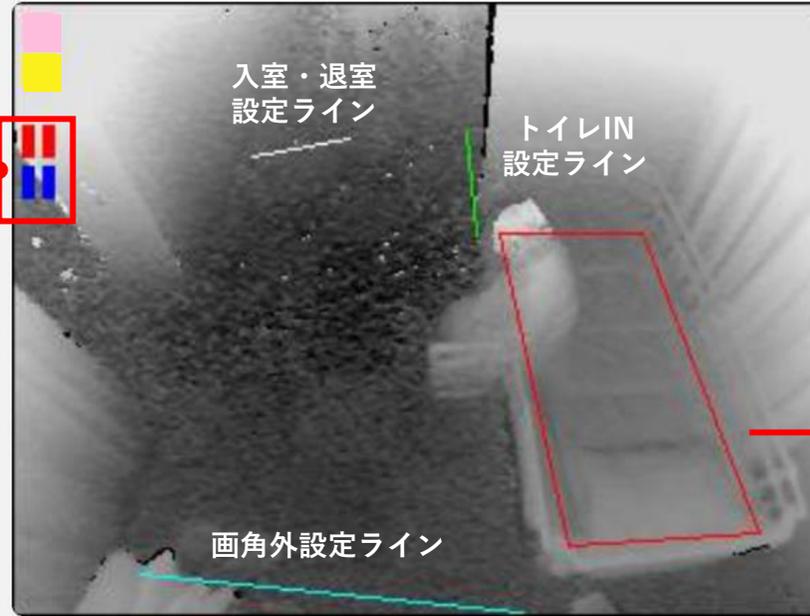

常時録画も可能

録画停止 録画一覧 検知履歴一覧

見守り開始 見守り一時停止 見守り終了

センサー設定 見守り設定 生体データ一覧

見守り履歴一覧 声かけ履歴一覧 シナリオ登録

この居室に登録されている
声かけ機器の自動声かけ/通話の履歴確認

ベッド枠

Attention

誤って見守りを終了
すると、自動で見守
りが開始されず、動
作検知ができません。
※誤って終了してし
まった場合は、見守り
開始をクリックして下
さい。

生体情報を
csvデータで抽出

この居室に登録されて
いる声かけ機器への
自動声かけ設定